

NOTICE D'UTILISATION SPECULUM CUSCO

Stérile à usage unique

REF 01.200 – 02.300 à 02.303 – carton de 100 unités

REF 02.304 – carton de 50 unités

CE 0499

STERILE EO	Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
	Date d'expiration
	Date de fabrication
	Usage unique
	Ne pas restériliser
LOT	Numéro de lot
	Notice



MODE D'EMPLOI

1. Vérifier l'intégralité de l'emballage, la date de péremption qui sont garants de la stérilité et de la qualité du produit.
2. Se laver les mains et enfiler des gants médicaux.
3. Sélectionner la taille du speculum en fonction de la morphologie de la patiente
4. Introduire délicatement les valves du speculum dans la cavité vaginale.
5. Ajuster l'ouverture en fonction des parois vaginales puis bloquer les valves du speculum en tournant la vis d'un quart de tour.
6. Une fois l'examen terminé, débloquer les valves en tournant d'un quart de tour dans le sens inverse de l'ouverture et retirer le speculum.

TRAITEMENT DU PRODUIT APRES UTILISATION

Après l'intervention, jeter le produit utilisé et de son emballage en se référant à la procédure en vigueur dans votre établissement, pour le traitement des déchets médicaux.



FABRIQUÉ PAR GYNEAS – Z.A Charles de Gaulle – 14 rue Ferdinand de Lesseps –
95190 Goussainville – FRANCE

AVERTISSEMENT

Lire la notice d'utilisation

Ce dispositif médical doit être utilisé par des professionnels de santé.

NE PAS UTILISER le matériel si son emballage a été ouvert ou endommagé, ou s'il présente un défaut survenu, suite au transport, à de mauvaises conditions de stockage, ou une mauvaise manipulation, qui pourrait nuire à son utilisation.

NOUS VOUS RAPPELONS QUE CES DISPOSITIFS SONT STRICTEMENT A USAGE UNIQUE, ET NE PEUVENT ÊTRE REUTILISES.

EN CAS DE REUTILISATION, LEURS PERFORMANCES POURRAIENT ÊTRE ALTEREES ET LE RISQUE DE CONTAMINATION IMPORTANT.