

Notice d'utilisation du set **EXTRIMPLANT®**

INDICATION : Set à usage unique pour le retrait de l'implant contraceptif sous-cutané.

PRECAUTION :

Ne pas utiliser en dehors de son indication

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

Nous vous rappelons que ces dispositifs sont strictement à usage unique, et ne peuvent être réutilisés.

En cas de réutilisation, leurs performances pourraient être altérées et le risque de contamination important

STERILE EO	Stérilisation à l'oxide d'éthylène
	Date d'expiration
	Date de fabrication
	Usage unique
	Ne pas restériliser
LOT	Numéro de lot
	Notice

COMPOSITION DU SET DE RETRAIT EXTRIMPLANT

Référence 01.381 - 1 boîte de 10 unités



- 1 blister dur compartimenté contenant :
- 1 champ troué adhésif
- 1 bistouri n° 11
- 5 compresses 7,5 x 7,5 cm non tissé
- 3 bandes de suture cutanée adhésives
- 1 bande de contention
- 1 seringue de sécurité 2,5 ml rétractable avec aiguille fixe de 25G x 5,8" (voir mode d'emploi)
- 1 pince de Halstead courbe
- 1 pince Extrimplant® (voir mode d'emploi)

 **Gyneas** - ZA Charles de Gaulle - 14 rue Ferdinand de Lesseps - 95190 Goussainville

Protocole d'utilisation Seringue de sécurité rétractable à aiguille fixe



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4

1. Ouvrir l'emballage tel qu'indiqué pour en retirer la seringue de sécurité rétractable.
2. Préparer le flacon pour l'aspiration du médicament. **Ne pas pousser le piston de la seringue au-delà de la première marque de graduation.**
3. Aspirer le médicament conformément au protocole de l'établissement. (Voir Figure 1).
4. Préparer le site d'injection et administrer le médicament conformément au protocole de l'établissement.
5. Pour activer le mécanisme de sécurité, enfoncer **COMPLETEMENT** le piston afin de permettre la rétraction de l'aiguille. (Voir Figure 2).
6. Tirer sur le piston jusqu'à ce qu'il se bloque; observer la rétraction de l'aiguille dans le cylindre. (Voir figure 3).
7. Casser le piston et la seringue sera définitivement inutilisable. (Voir Figure 4).
8. Mettre immédiatement au rebut dans un contenant pour objets tranchants ou pointus, conformément aux procédures de l'établissement.



Mode d'emploi de la pince EXTRIMPLANT®

Set extrimplant®

Réf. 01.381

Sécuriser le retrait de l'implant en limitant la longueur de l'incision et le temps d'exécution grâce à l'utilisation d'une nouvelle pince.

La pince EXTRIMPLANT®

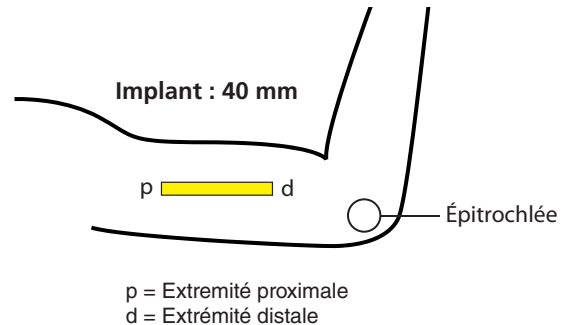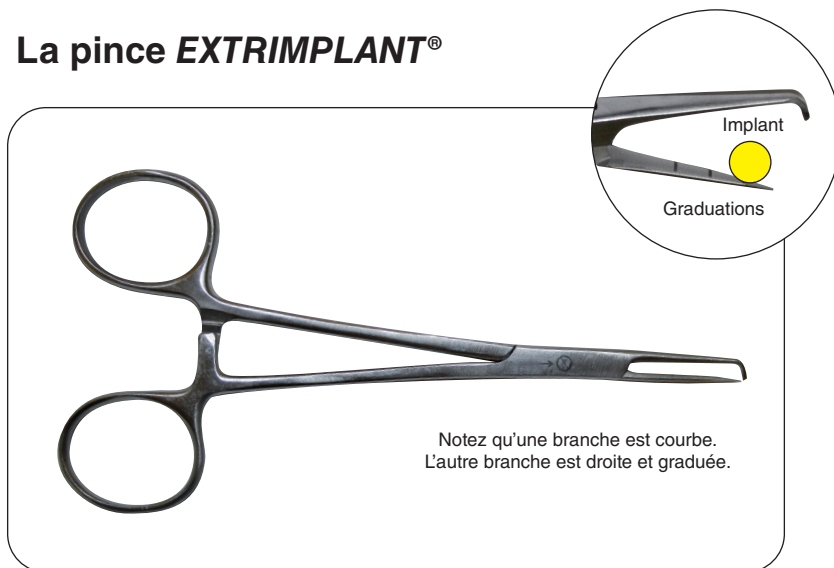


Implant à la face interne du bras


Utilisation de la pince extrimplant® pour le retrait sécurisé des implants contraceptifs :

1. Repérer l'implant et laisser une trace sur la peau avec un marqueur. Désinfecter soigneusement la région.
(NB- la Bétadine n'efface pas les marques)
 2. Anesthésie locale : Injecter 0.5 à 1ml de Lidocaïne à 1% (avec ou sans adrénaline) sous l'extrémité distale au point d pour la remonter mais aussi latéralement sur une hauteur de 1 cm.
 3. Saisir l'implant à 0.5 cm à 1cm du point d en introduisant, en premier, sous cette extrémité, la branche droite de la pince. La graduation sert à repérer la profondeur de pénétration de la pince.
 4. Fermer la pince et rabattre la branche courbe de la pince vers l'extrémité proximale de l'implant (vers l'épaule) de manière à pouvoir soulever l'extrémité distale (vers la main) avec la branche droite. Immobiliser l'implant. Il se forme alors un bombement de la peau au point d.
 5. Inciser la peau en douceur sur 2 à 4 mm au dessus de ce bombement. L'implant apparaît facilement.
 6. Extraire l'implant à l'aide de la pince courbe de Halstead. Il est souvent nécessaire d'avoir à le libérer d'une gaine fibreuse qui le retient.
 7. Mettre en place une suture cutanée adhésive à retirer au bout de 5 à 6 jours. Laisser un bandage compressif en place pendant 24 à 48 heures.
- NB – AVANT D'INCISER :** s'assurer que l'implant est bien saisi par la pince en vérifiant que les mouvements imprimés à la pince sont transmis à l'implant.
- NB -** Certaines femmes ont une peau difficile à traverser par la pince. Utiliser alors la pointe du bistouri pour faciliter l'introduction de la pince


Anesthésie

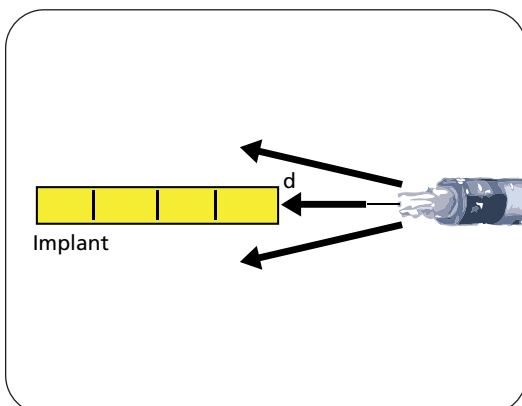

Préhension

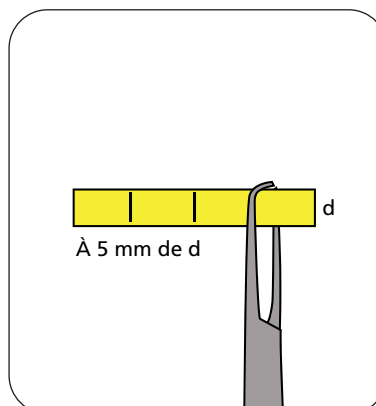

Incision

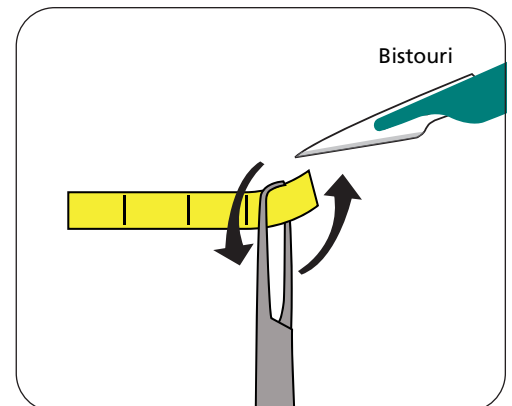

Concepteur de la pince EXTRIMPLANT® : Dr Henri LEVY (Paris)