



FABRIQUÉ PAR GYNEAS – Z.A Charles de Gaulle – 14 rue Ferdinand de Lesseps –
95190 Goussainville – FRANCE

Perforateur Amniotique

Stérile à usage unique

REF 01.400

Carton de 150 unités



MODE D'EMPLOI

Vérifiez l'intégralité de l'emballage et la date de péremption qui sont garants de la stérilité et de la qualité du produit.

Positionnez le perforateur amniotique sur l'index.

Introduire le perforateur amniotique jusqu'à la poche des eaux.

Exercer un mouvement de va et vient afin que la pointe du crochet à l'extrémité perfore la membrane.

Retirer le crochet.

Après l'utilisation, jeter le produit utilisé et son emballage en se référant à la procédure en vigueur dans votre établissement, pour le traitement des déchets médicaux.

AVERTISSEMENT

Lire la notice d'utilisation

Ce dispositif médical doit être utilisé par des professionnels de santé.

NE PAS UTILISER le matériel si son emballage a été ouvert ou endommagé, ou s'il présente un défaut survenu, suite au transport, à de mauvaises conditions de stockage, ou une mauvaise manipulation, qui pourrait nuire à son utilisation.

NOUS VOUS RAPPELONS QUE CES DISPOSITIFS SONT STRICTEMENT A USAGE UNIQUE, ET NE PEUVENT ÊTRE REUTILISÉS. EN CAS DE REUTILISATION, LEUR PERFORMANCES POURRAIENT ÊTRE ALTÉRÉES ET LE RISQUE DE CONTAMINATION IMPORTANT.